


Rahatlayın, stres yok

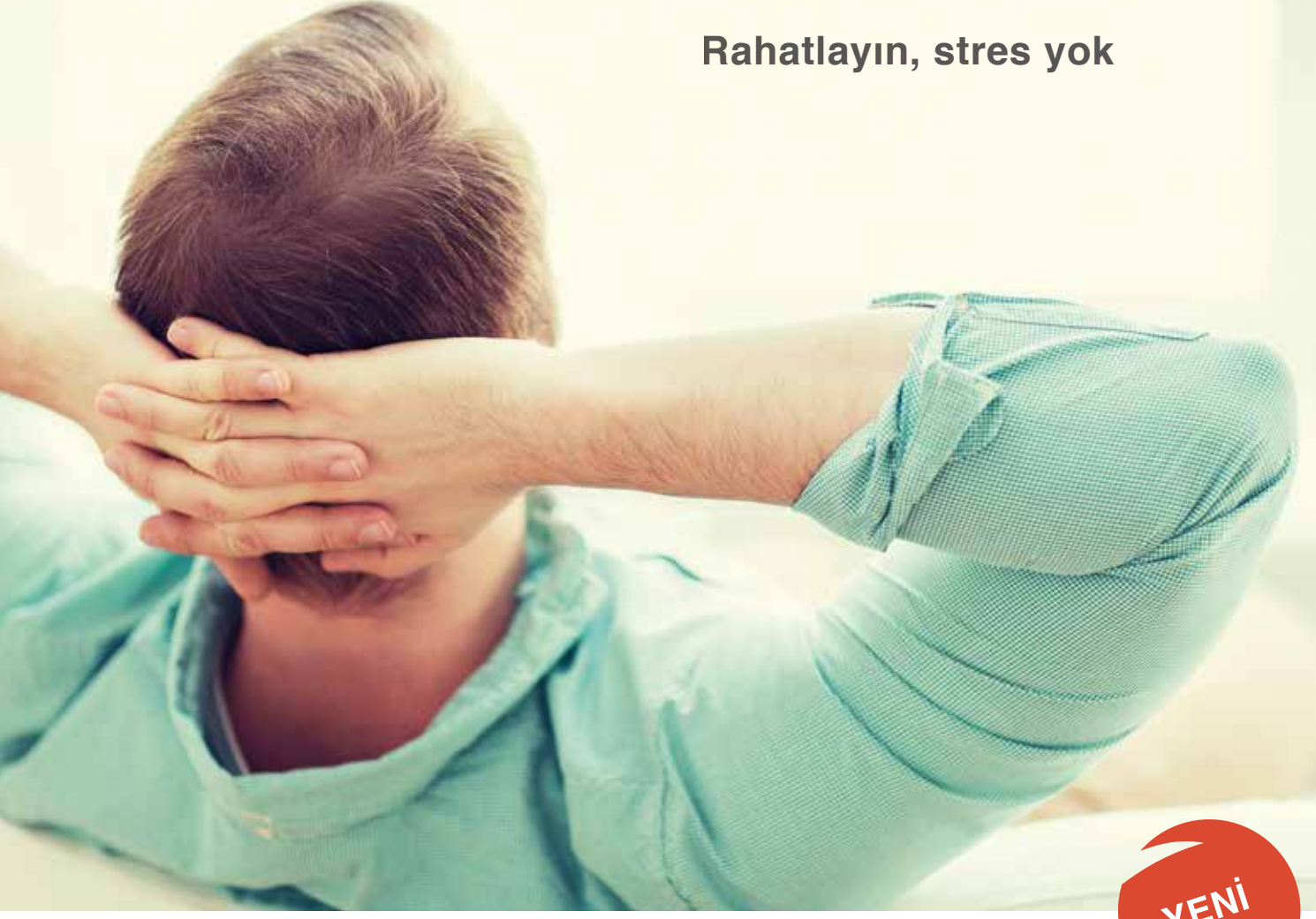

YENİ


Estelite Bulk Fill *Flow*



Büzülme Stresini Elemine Eden Tek Tabaka Akışkan Teknoloji

Estetik restorasyonlarınız için gerekli olan kavite konfigürasyonlarında **stresi** ortadan kaldıran akışkan **Bulk** kompozit sonunda sizlerle.

Estelite Bulk Fill Flow

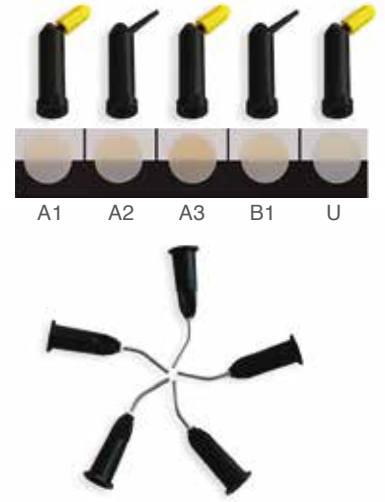

Endikasyonları:

- Lateral-posterior kavite restorasyonları
- Klas I ve II kavite astarlama
- İndirek restorasyonlarda kavite tabanının astarlanması
- Undercutların elemine edilmesi
- Porselen ve kompozitlerin küçük tamirleri

Dental Restorasyonlar İçin Rezin Kompozit!

Kolay

- 4mm'ye kadar tek seferde yığıma.
- Hİçbir restorasyonda üzerini kapatmaya gerek yoktur.
- Çok kolay cilalama.

Estetik

- Çok etkin renk uyumu.
- Çok uzun süre stabil parlaklık.

Güvenilir



- Azaltılmış büzülme stresi.
- Kavite duvarlarına çok iyi adaptasyon.
- Yüksek aşınım direnci ve karşı dişi minimum aşındırma.

SUPRA-NANO SFERİKAL DOLDURUCU


- Mükemmel cila.
- Uzun süre stabil parlaklık.
- Yüksek fiziksel ve mekanik performans.

YENİ PATENTLİ KENARSIZ DOLDURUCU TEKNOLOJİSİ


- Küresel prepolimerize Supra-Nano doldurucu.
- Azaltılmış stres.
- Azaltılmış polimerizasyon büzülmesi.

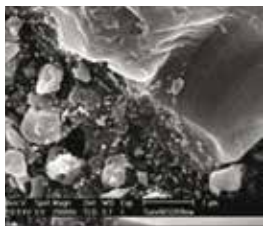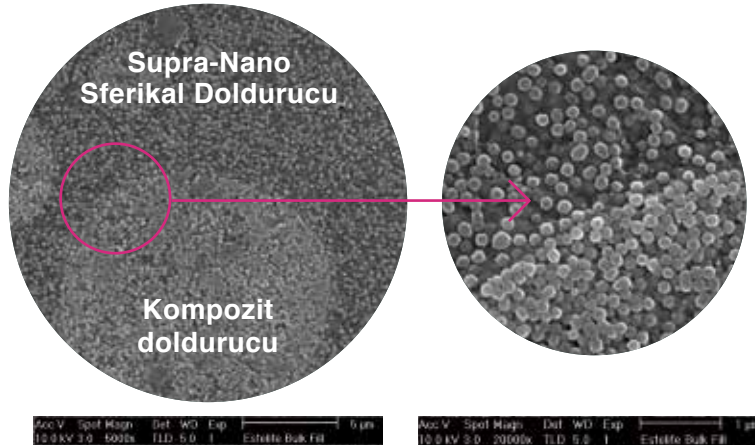

X

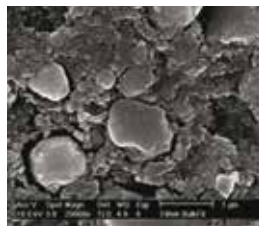

Y

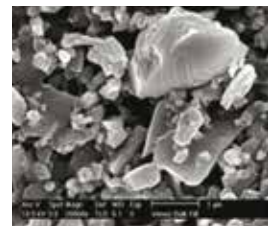

Z

Kolay

Estelite Bulk Fill *Flow* geleneksel Bulk Fill kompozitlerden farklı olarak final kapatmaya ihtiyaç duymaz.
Estelite Bulk Fill *Flow* ile tek tabaka 4mm derinliğinde restorasyonlar yapılabilir.
Tokuyamanın patentli radikal güçlendirilmiş foto polimerizasyon teknolojisi sayesinde led veya halojen cihazla 10 saniye ışık yeterlidir

Estetik Sonuçlar



Estelite Bulk Fill *Flow*.
4mm tek tabaka.



Üniversal kompozitle
final kapama gerektiren
Bulk Fill.



Klasik tabakalama.


Hızlı Kurlenme, Mükemmel Pürüzsüzlük, Kendiliğinden Seviyelenme



10 saniyede kurlenme
($>_{800\text{mW} / \text{cm}^2}$)



Kavite içerisindeki
görünüm
1 - 2 - 3

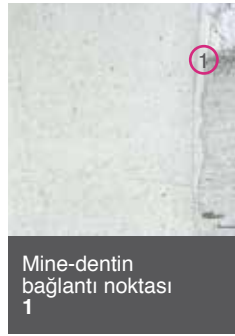

Mine-dentin
bağlantı noktası
1



Kavite
açıkları
2




Kavite
koridoru
3

Estelite Bulk Fill *Flow* (Adesivo: BF II)


Kolay Cilalanabilirlik



Sadece
10 saniye içinde
parlaklık
%80'in üzerine
çıkıyor.

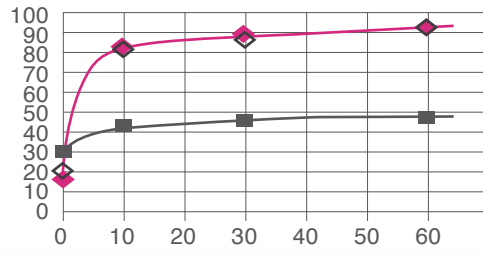

◆ ESTELITE BULK FILL *Flow*
◇ Estelite ΣQuick
■ T*
60 saniye içindeki
parlaklık ölçümü

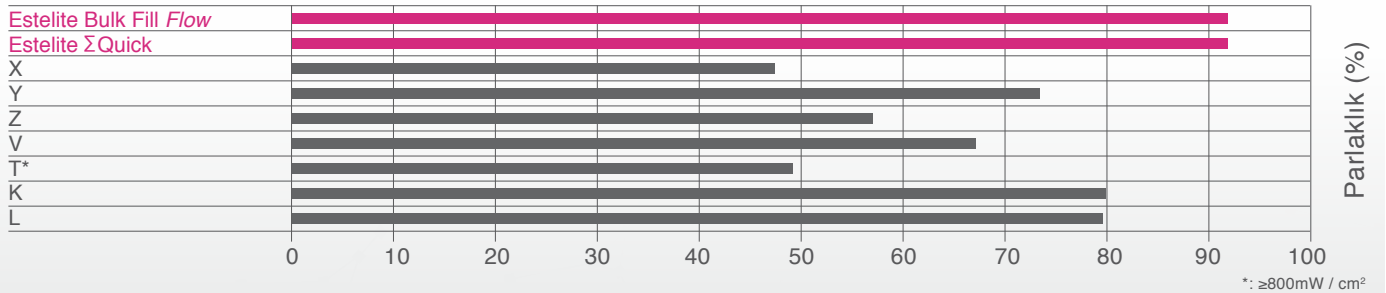


*: $\geq 800\text{mW} / \text{cm}^2$

Estetik

Estelite Bulk Fill *Flow*'un doğal estetik bir etkisi vardır.

Estelite Bulk Fill *Flow* kompozitleri, bukalemun etkisi ve çok iyi derecelendirilmiş şeffaflığı sayesinde mükemmel bir renk uyumu sunar.

Kompozit restorasyon ile doğal dişi ayırmak neredeyse imkansız.

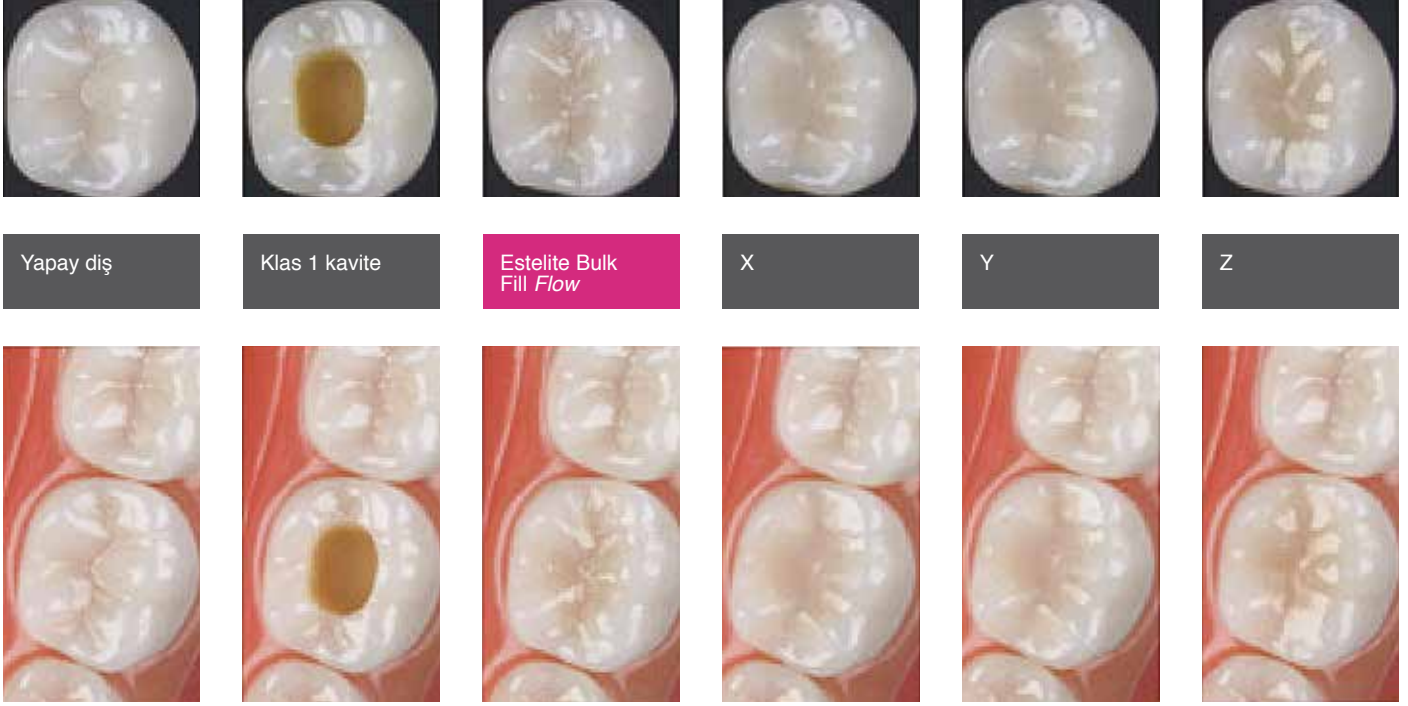


Uzun Dönem Stabil Parlaklık

Tokuyama'nın geliştirdiği ve tüm kompozit ailesinde kullandığı patentli Supra-Nano Küresel Doldurucu Teknolojisi Bulk Fill *Flow*'un da ana karakterini oluşturur.

Doldurucu parçaların eşsiz yapısı pürüzsüz bir yüzey ve çok uzun süre stabil kalan bir parlaklık sağlar.

10.000 ISI TESTİNDEN SONRAKİ PARLAKLIK

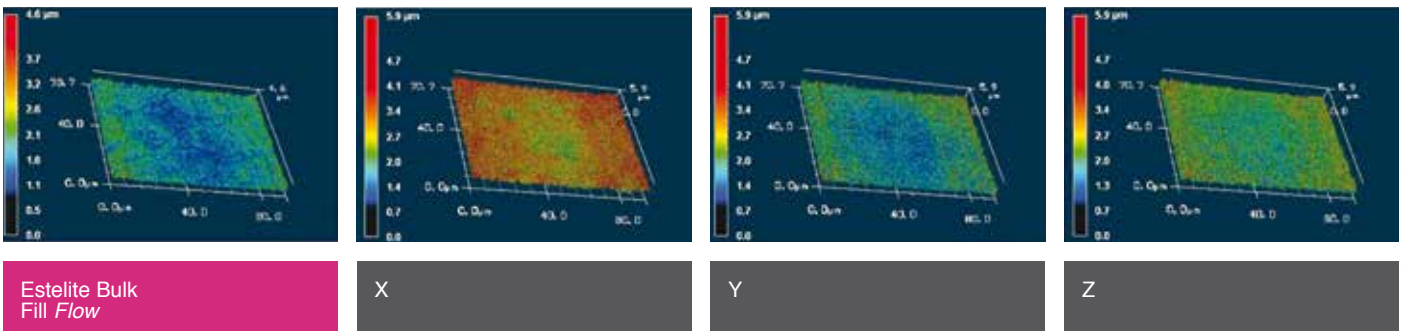


Güvenilir

DÜŞÜK BÜZÜLME STRESİ

Supra-Nano partiküllerin küresel şekli ve yeni kenarsız yuvarlatılmış doldurucular polimerizasyon sırasında doldurucuların hareket etmesini kısıtlar. Bu sayede organik matrislerle doldurucu parçalar arasındaki sürtünme azalır. Malzeme polimerize olurken büzülen rezinler polimerler oluşturur. Fakat doldurucu parçalar stresi minimize etmek için pozisyon oluşturmada özgür kalır.

4MM'LİK KALIN TABAKADA BÜZÜLME STRESİ ÖLÇÜMÜ

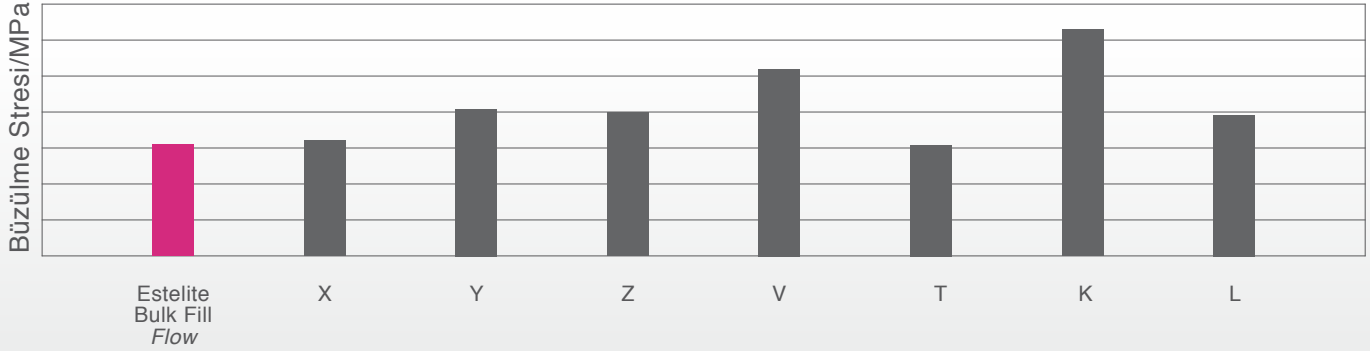

Düşük büzülme stresi ve yüksek radyopasite (%170).

Yüksek aşınım direnci ve karşı dişi minimum aşındırma özellikleriyle bu yeni ürünü zirveye taşıyor.


YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ & KARŞI DİŞİ MİNİMUM AŞINDIRMA



Aşınım direnci 0.66 mpa yükü 50.000 tekrarlar ölçülmüştür.

ESNEME MUKAVEMETİ (MPa)

BASINÇ MUKAVEMETİ (MPa)

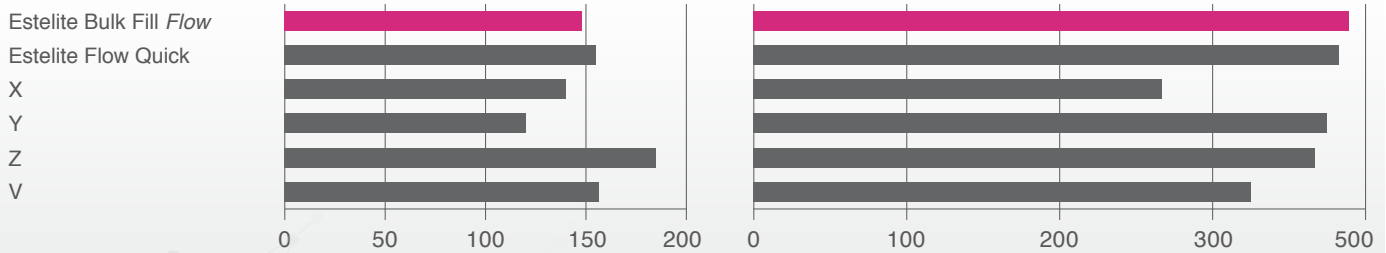

Ambalaj Opsiyonları



ESTELITE BULK FILL Flow
3gr'lık ekonomik şırınga

65 €
+KDV



ESTELITE BULK FILL Flow
20 adet 0,20gr'lık kompül set

110 €
+KDV

RENK SEÇENEKLERİ



Bizi izlemeye devam edin!
Gelecekteki bir çok yenilik
Tokuyama Dünyasında...

 **Tokuyama Dental**
TÜRKİYE

Tokuyama Dental
Ankara Ofisi
Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks : (0312) 430 55 17

Tokuyama Dental
İstanbul Ofisi
Oğuzhan Cad. Çaçanak Sk. No: 5/3
Fındızkade-Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks : (0212) 491 10 89

www.tokuyamaturkiye.com
info@tokuyamaturkiye.com


[/tokuyamaturkiye](https://www.facebook.com/tokuyamaturkiye)

distributed by
dünya
dental
www.dunyadental.com