


OMNICHROMA FLOW boşluğun rengine uyum sağlayan akıcı bir kompozittir.

Işıklı kürlemeden önce, OMNICHROMA FLOW opak beyazdır; bu da kürlenmemiş pat ile diş yapısını ayırt etmeyi kolaylaştırır.

OMNICHROMA FLOW (Kalınlık 1 mm)

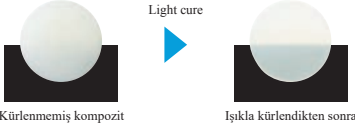

Işıklı kürlendikten sonra OMNICHROMA FLOW kavitenin rengine uyum sağlayarak doğal bir görünüm kazandırır.



Yapay dişlerde OMNICHROMA FLOW (Işıklı kürlemeden önce ve sonra)


Işıklı kürlemeden önce



Işıklı kürlemeden sonra



Renk değişimi belirgin olan dişlerde OMNICHROMA FLOW kullanıldığında ışıklı kürleme sonrasında renk parlaklığı azalırken değer artar.

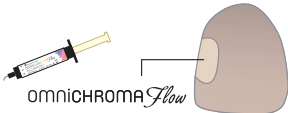


Renk adaptasyonu süreciyle etkileşimi önlemek için diş yapısı olmayan geniş Sınıf III ve IV boşlukları restore etmek veya rengi değişmiş dişleri maskelemek için OMNICHROMA FLOW ile doldurmadan önce BLOCKER (OMNICHROMA BLOCKER veya OMNICHROMA BLOCKER FLOW) kullanın.

BLOCKER kullanımına ilişkin talimatlar için arkaya bakın.

BLOCKER

—omnichroma—
BLOCKER

omnichroma *Flow*
BLOCKER

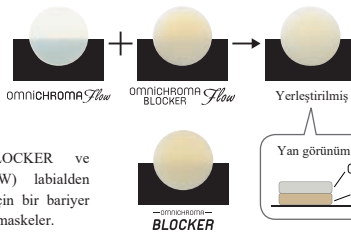

OMNICHROMA
FLOW, BLOCKER
üzerine uygulandığında
rengi BLOCKER'in renk
tonuna uyum sağlar.


BLOCKER (OMNICHROMA BLOCKER ve OMNICHROMA BLOCKER FLOW) labialden linguale iletilirken ışığı engellemek için bir bariyer sağlar veya ağız içinin karanlık rengini maskeler.

Yan görünüm görüntüsü
omnichroma *Flow* 1mm
omnichroma *Flow* 1mm
BLOCKER

Geniş Sınıf III ve IV boşluğun doğrudan restorasyonu


Çevreleyen diş yapısı olmayan geniş Sınıf III ve IV boşlukların doğrudan restorasyonu için OMNICHROMA FLOW eklemenden önce bir lingual shelf oluşturmak için BLOCKER kullanın. BLOCKER, renk tonu adaptasyonunu iyileştirir ve OMNICHROMA FLOW'un ağız boşluğunun koyu rengini almasını ve potansiyel olarak değerinin düşmesini önler.

* Hem estetiği hem de tutuşu iyileştirmek için ön preparasyonların mine kenarlarına eğim (bevel) ekleyin.

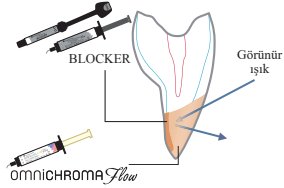

BLOCKER tabakasının kalınlığı vakaya göre değişir; standart 0,5 mm'dir.

Yüksek parlaklığa sahip/opak vakalar için daha kalın bir BLOCKER tabakası ve düşük parlaklığa sahip/şeffaf vakalar için daha ince bir tabaka kullanın.

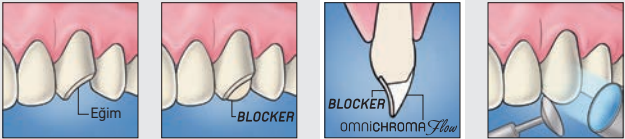

Rengi değişmiş dişleri veya metali maskeleme

Rengi değişmiş dişleri maskelemek için OMNICHROMA FLOW ile doldurmadan önce BLOCKER veya renk maskeleme malzemesi kullanın. OMNICHROMA FLOW, BLOCKER veya renk maskeleme malzemesinin rengine uyum sağlar.

Metal için Estelite high chroma opak kullanın.

